

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	Mayfield
Modelo	D1411/D1471/D1481
Producto	Mascarilla KN95 Fish Shape
Estándar	GB2626-2019
Uso	No médico
Registro y certificación	FDA (10076152/D411433), CE NTP329.200:2020

Esta mascarilla KN95 Fish Shape es de tipo de oreja colgante de cuadro (04) capas, una capa externa tela no tejida de polipropileno de 25g/m², dos capa de filtro de tela filtro no tejida meltblown de 25g/m², una capa interna de tela no tejida de polipropileno de 25g/m², confortable a la piel), la capacidad de filtración general supera el 98%.



DATOS TÉCNICOS

1 Capa externa	Tela no tejida de polipropileno de 25g/m ²
2 Capa de filtro	2 capas de tela filtro no tejida melt blown de 25g/m ²
1 Capa interna	Telanotejida de polipropileno de 25g/m ² ,confortable a la piel
Clip nasal	Metálico encapsulado moldeable
Sujetador	Elástico
Talla	Estandar
Medida	20.4*8.0cm
Eficiencia de filtración	≥98%

PRESENTACIÓN

Caja de 20 mascarillas
Cajón master de 84 cajas

CARACTERÍSTICAS

Color blanco
Hipoalergénico
Vigencia 02 años

INSTRUCCIONES DE USO



1. Asegúrate que tus manos estén limpias, Abre tu máscara, Mirar hacia afuera.

2. Ponte la máscara en la cara.

3. Cúbrase la nariz y cuelgue el cordón detrás de las orejas.

4. Presione la barra de fijación de acuerdo con la forma de la nariz para fijarla, ajuste la máscara para completar el uso.