


Maniqui Ajustable de RCP Adulto/ Niño

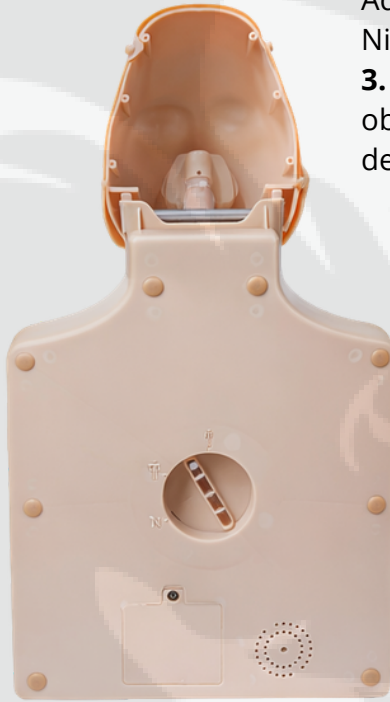

CARACTERÍSTICAS:

1. Simula una vía aérea abierta estándar.
2. Compresión torácica externa.
Adultos: profundidad de compresión de 5 cm.
Niños: profundidad de compresión de 3 cm.
3. Respiración artificial: evalúe la ventilación observando el movimiento ascendente y descendente del tórax.

medida:

- Alto 55cm
- Ancho 28.5 cm

MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO:

1. Respiración artificial: abra la vía aérea, levante el cuello con la cara hacia arriba, sople lentamente hasta que se expanda el tórax y, a continuación, deje de soplar.
2. Compresión torácica externa: Coloque una mano sobre la otra entre los dos pezones y comprima el tórax.
3. Frecuencia de compresión: 100 veces/min o 120 veces/min.



INCLUYE

- FUNDA PARA GUARDADO
- CAJA CON 50 MASCARILLA DE REPUESTO